




1.

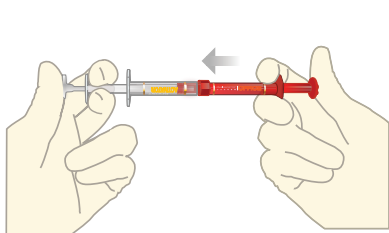


4.

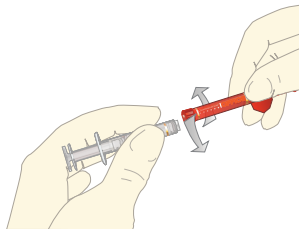


2.

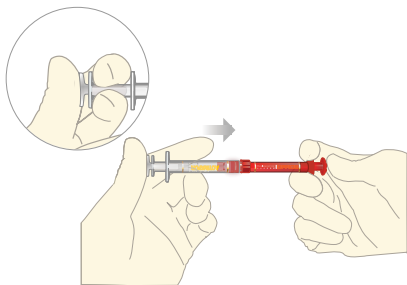


5.

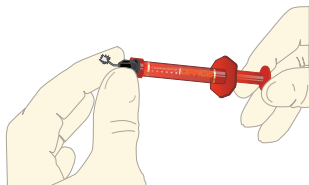

3.

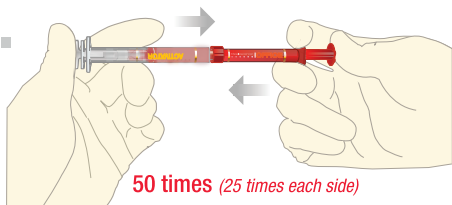

50 times (25 times each side)

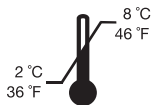

EN-Refrigerate
DE-Kühlen
FR-Réfrigérer
NL-In de koelkast bewaren
IT-Conservare in frigorifero
ES-Refrigerar
PT-Refrigerar

SV-Kyl ned
DA-Opbevarer i køleskab
FI-Jäähdytetettävä.
NO-Må holdes avkjølt
EL-Το διατηρείτε στο ψυγείο
PL-Przechowywać w chłodzarnie
TK-Buzdolabında tutun

- EN - Allow contents of syringe to come to room temperature before mixing the two chemicals together.
- DE - Lassen Sie den Inhalt der Spritzen zunächst Raumtemperatur annehmen, bevor Sie die beiden Chemikalien miteinander vermischen.
- FR - Laissez le contenu de la seringue se réchauffer à la température ambiante avant de mélanger les deux produits chimiques ensemble.
- NL - Laat de inhoud van de spuit op kamertemperatuur komen voordat u de twee chemische stoffen met elkaar mengt.
- IT - Consentire che il contenuto della doppia siringa raggiunga una temperatura ambiente prima di iniziare la procedura di miscelazione dei due prodotti.
- ES - Permita que el contenido de las jeringas se encuentre a temperatura ambiente antes de mezclar ambos químicos entre sí.
- PT - Deixe o conteúdo da seringa atingir a temperatura ambiente antes de o misturar com as duas substâncias químicas.
- SV - Låt innehålllet i sprutan uppnå rumstemperatur innan de två kemikalierna blandas.
- DA - Sprøjstens indhold skal opnå stuetemperatur, inden de to kemikalier blandes.
- FI - Anna ruiskujen sisältöjen tasaantua huoneenlämpöön ennen molempien kemikaalien sekoittamista.
- NR - La innholdet i sprøyten oppnå romtemperatur, før de to kjemikaliene blandes sammen.
- EL - Αφήστε το περιεχόμενο της σύριγγας να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου προτού αναμιξετε τις δύο χημικές ουσίες.
- PL - Przed zmieszaniem składników preparatu Opalescence Boost należy je doprowadzić do temperatury pokojowej.
- TK - İki kimyasal maddeyi karıştırmadan önce şırınga içeriğinin oda sıcaklığını gelmesini bekleyin.